


Учебен манекен бебе Престън Профешънъл

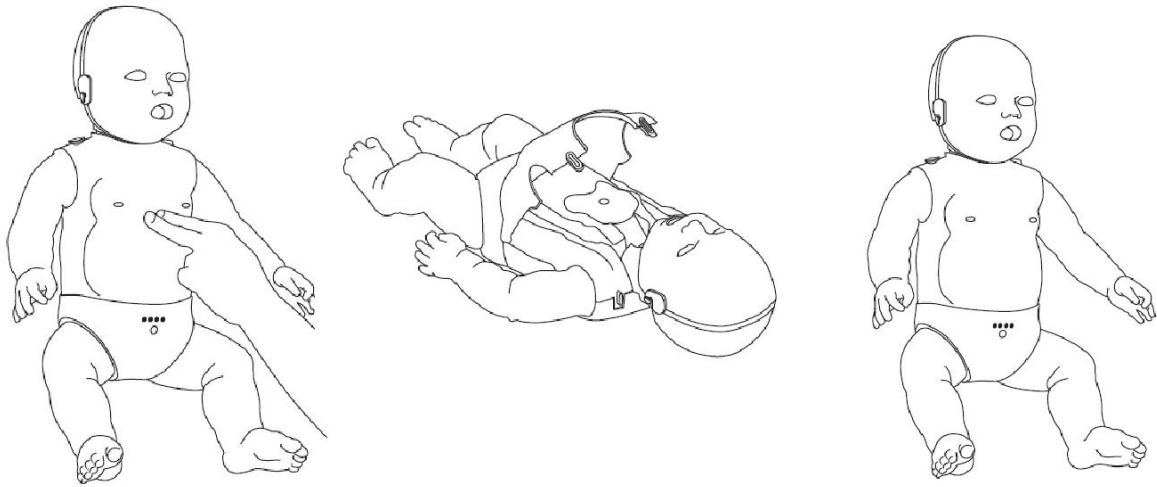

Инструкция за употреба и поддръжка

Модели PP-IM-100M и PP-IM-400M —> Учебен манекен бебе за кардио-пулмонарна ресусцитация и първа помощ с автоматичен външен дефибрилатор Престън Профешънъл КПР-АВД (с КПР индикатор) с 10 бр. найлонови торбички бял дроб/ предпазна маска и чанта за транспортиране

Модели PP-IM-100 и PP-IM-400 —> Учебен манекен бебе за кардио-пулмонарна ресусцитация и първа помощ с автоматичен външен дефибрилатор Престън Профешънъл КПР-АВД възрастен (без КПР индикатор) с 10 бр. найлонови торбички бял дроб/ предпазна маска и чанта за транспортиране

НАЧАЛО

- Прочетете инструкцията за употреба и поддръжка преди да използвате учебния манекен бебе Престън Профешънъл КПР-АВД.
- Почистете кожата на лицето и тялото на манекена бебе (отпред и отзад) преди всеки конкретен учебен клас (вижте частта Почистване по-нататък).
- Ако имате проблем с поддръжката или употребата на манекена бебе Престън Профешънъл, обърнете се към частта Отстраняване на проблеми или се свържете с вашия дистрибутор FirstAidBG.com на тел. +359 897 802 302, +359 888 246 151, www.firstaidbg.com.

Благодарим ви, че предпочетохте манекен бебе Престън Профешънъл!


Ако имате въпроси за манекените бебе Престън Профешънъл, ако желаете да поръчате още манекени, консумативи или резервни части, моля, свържете се с местния дистрибутор на [Prestan Products Professional Training Products](http://PrestanProducts.com).

За информация за дистрибуторите на [Prestan Products Profession Training Products Distributors](http://PrestanProducts.com), моля да се свържете с [Prestan Products](http://PrestanProducts.com) на тел. 1-800-434-7989 от понеделник до петък от 9:00 до 17:00 EST.

СЪДЪРЖАНИЕ

Проверете съдържанието на кутията. То трябва да се състои от: едно цяло тяло на манекена бебе, 10 бр. найлонови торбички бял дроб/ предпазна маска, 2 батерии АА (поставени на място в индикатора) и чанта за транспортиране. Ако нещо от окомплектовката не е налично, моля, свържете се с вашия дистрибутор на Престън Профешънъл. Всички компоненти, включително филтърните предпазни маски и торбичките бял дроб НЕ съдържат латекс.

КОМПОНЕНТИ

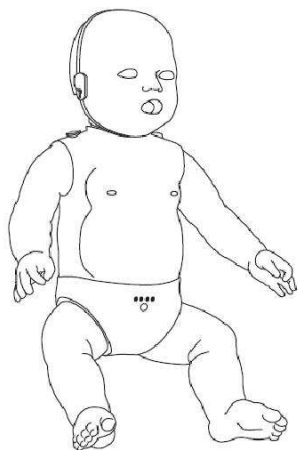


Цяло тяло на бебе



Чанта за транспортиране на 1 бр. манекен бебе



Чанта за транспортиране на комплект 4 бр. манекени бебе

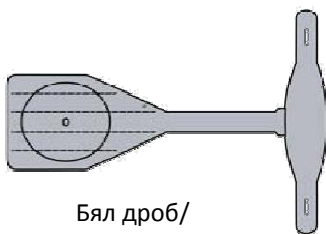

Бял дроб/
предпазна маска



Филтърна предпазна маска (не е включена, може да се поръча допълнително)

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОЧИСТВАНЕ

- Кожата на лицето и тялото на манекена Престън Профешънъл са направени от един и същи материал и могат да се почистват по един и същи начин.
- Ако повърхността на манекена се замърси, почистете го с разтвор на сапун и вода. Ако повърхността е много замърсена, може да използвате обичайните битови препарати за почистване. Препоръчва се тези препарати да бъдат употребявани внимателно, с минимално количество абразиви, за да се осигури дълготраен живот на материала.
- Кожата на лицето може също да се дезинфекцира с почистващи кърпички със съдържание на спирт, както и с 1/4 чаена чаша белина, разтворена в 4 л вода за 10 мин. След всеки обучаван, инструктора или обучавания могат да почистват лицето на манекена с почистващи кърпички, като допълнителна мярка за сигурност.
- Не забравяйте да почиствате по същия начин горната повърхност и кожата на гърдите на манекена, за да поддържате хигиената му.

Учебен манекен бебе Престън Профешънъл

ИНДИКАТОР на скоростта на притискане

Индикаторът на скоростта на притискане на учебния манекен бебе Престън Профешънъл има уникалната способност да проследява, както дълбочината на извънгръдните притискания, така и тяхната скорост.

Включете светлинния индикатор над памперса на манекена бебе чрез натискане на on/off бутона. Четирите светлини на индикатора ще светнат, както и зелената светлина “on” под тях, указваща, че всичко работи нормално и батериите са годни.

Ако светлините не светнат, проверете батериите, чрез изваждане на индикатора.

Има три щипки, които държат индикатора на мястото му

С помощта на плоска отвертка внимателно натиснете навътре и повдигнете всяка щипка внимателно. След като откачите и последната щипка, повдигнете индикатора. Батериите се намират зад индикатора в отделението за батерии.

Заменете негодните батерии.

Светлините ще светнат за около 3 сек., след което ще угаснат, но зелената светлина под тях ще остане светната, показвайки, че индикатора е включен.

Щом се започнат извънгръдни притискания, от нула до 60 в минута, ще светне червената светлина.

С увеличаване на скоростта на притисканията и достигане до 60 в минута, червената светлина ще угасне и жълтата светлина ще светне до достигане на 80 притискания в минута.

С достигане на 80 извънгръдни притискания в минута, жълтата светлина ще угасне и едната зелена светлина ще светне до достигане на 100 притискания в минута .


Когато се достигнат 100 извънгръдни притискания в минута, втората зелена светлина също ще светне, показвайки, че е достигната правилната скорост на притискане.

Ако скоростта се намали, едната зелена светлина ще угасне, показвайки, че трябва да се увеличи скоростта.

Ако дълбочината на притискане не е достатъчна, всички светлини ще угаснат и червената светлина ще започне да примигва.


ОКОМПЛЕКТОВКА

- Отворете тялото на манекена Престън Профешънъл, като откопчаете щипките на раменете на манекена и внимателно повдигнете нагоре предната част на гърдите.
Не повдигайте за щипките (Фиг. 1).

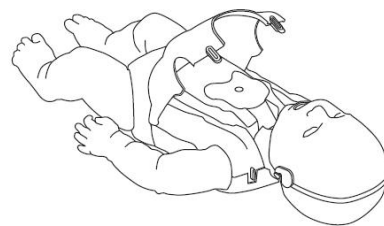


Фиг. 1

- Сгънете торбичката бял дроб/ предпазна маска:
 - Торбичката бял дроб/ предпазна маска има 4 пунктирани линии, отпечатани от едната страна на торбичката (заедно с кръг).
 - Използвайки четирите пунктирани линии, сгънете торбичката на четвъртини, следвайки диаграмата по-долу

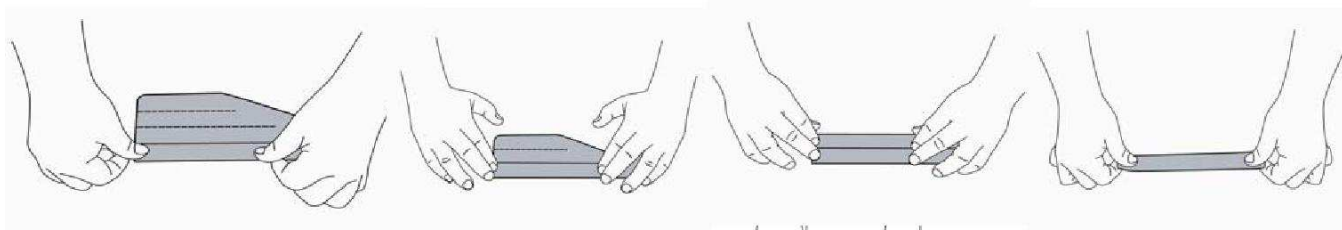


- Наклонете назад главата на манекена.

Вкарайте сгънатия край на торбичката в устата на манекена (Фиг. 2).

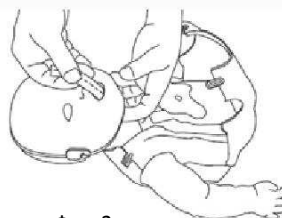

Фиг. 2


- Проверете торбичката през устата на манекена, докато се покаже през врата (Фиг. 3).

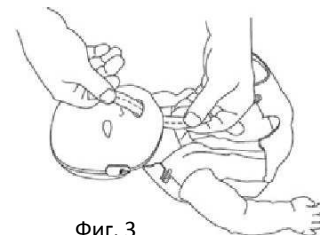

Фиг. 3

- Хванете стърчащия от врата край и го издърпайте (Фиг. 3)

- Наместете торбичката бял дроб/ предпазна маска върху повърхността за извънгръдни притискания (твърдото пластмасово място върху вътрешната част на гърдите на манекена), така че да съвпадне с отпечатания на торбичката кръг (Фиг. 4).

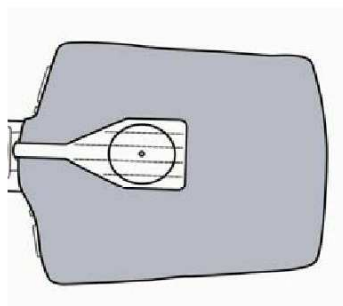


Фиг. 4

- УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ ТОРБИЧКАТА НЕ Е УСУКАНА ИЛИ СМАЧКАНА!

- Прикрепете предпазната маска на кукичките от двете страни на главата на манекена (Фиг. 5).

- ☐ Тялото на манекена може вече да бъде затворено, чрез натискане надолу на щипките върху раменете, докато щракнат на местата си.

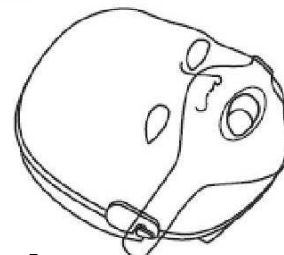

Фиг. 5

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

- Ако гърдите не се издуват, когато вдухате въздух в торбичката бял дроб/ предпазна маска:
 - Проверете дали главата е правилно отведена назад
 - Проверете самата торбичка. Уверете се, че е правилно поставена върху мястото за извънгръдни притискания, без усуквания и смачквания.
 - Проверете предпазната маска. Уверете се, че е прикрепена към кукичките от двете страни на главата на манекена и приляга опъната по лицето на манекена.
 - Проверете торбичката, дали не е скъсана.
- Ако не се чува щракане при натискане на гърдите на манекена:
 - Уверете се, че притискате мястото за извънгръдни притискания достатъчно дълбоко, би трябвало да чуете щракане, когато гърдите хлътнат повече от 5 см.
- Ако светлините не светват по време на извънгръдните притискания:
 - Проверете дали има 2 AA батерии в отделението за батерии от задната страна на лявото рамо на манекена.
 - Уверете се, че батериите са годни.

ЕДНОГОДИШНА ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ НА ПРОДУКТИТЕ ПРЕСТЪН

1. ПОКРИТИЕ НА ГАРАНЦИЯТА. Производителят дава ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ за всякакви дефекти в изработката и материалите на манекените при правилна употреба.
2. ГАРАНЦИОНЕН СРОК. Производителят дава гаранция на манекените в срок от 1 година от датата на закупуване. Всяка част на манекените Престън Профешънъл, която покаже дефект в рамките на 12 месеца от закупуване на манекена, ще бъде ремонтирана или сменена от производителя, по негово решение, безплатно за клиента. Транспортните разходи до посочено от производителя място са за сметка на клиента.
3. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ГАРАНЦИЯТА. Производителят ще ремонтира или замени (в зависимост от конкретната възможност) всяка дефектна част, покриваща се от гаранцията, съгласно т. 2 за собствена сметка, без транспортните разходи. Единствената претенция на клиента към производителя може да бъде ремонта или замяната на дефектна стока, както е упоменато тук. Ремонтът или замяната на част от учебен манекен Престън Профешънъл не води до удължаване на ограничената гаранция или започване на нов гаранционен срок.
4. УСЛОВИЯ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГАРАНЦИЯТА И ДРУГИ ОГРАНИЧЕНИЯ.
 - (a) Производителят си запазва правото да откаже гаранционен сервиз или замяна, когато проблемът е следствие от неправилна употреба, злоупотреба, злонамереност, неправилно слоббяване, подобрения, използване на нерегламентирани части или приспособления, ремонти, направени от който и да е друг, освен производителя или негов оторизиран представител, или каквито и да е други причини, различни от дефекти в изработката и материалите.
 - (b) Тази ограничена гаранция не покрива надраскване, необичайна употреба, повреда, причинена от неправилна употреба, злоупотреба или нерегламентирани модификации. Тази гаранция отпада, ако манекенът Престън Профешънъл е променен структурно.
 - (c) Клиентът трябва да докаже датата на закупуване, мястото на закупуване и цената за закупуване, за да получи ганационно обслужване по тази ограничена гаранция.
 - (d) Производителят не дава никаква друга гаранция, освен описаната тук. Нито агент, нито представител, търговец или работник на производителя няма право да променя условията или ограниченията по тази гаранция.
5. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПОДРАЗБИРАЩИТЕ СЕ ГАРАНЦИИ И УВРЕДИ
 - a) Всички подразбиращи се гаранции на учебния манекен Престън Профешънъл, вкл. подразбиращи се гаранции за продаваемост или пригодност за определена цел, не могат да превишават по време съответните срокове на тази ограничена гаранция, която започва от датата на закупуването му. Някои държави не допускат ограничения във времето на подразбиращата се гаранция, така че горното ограничение може и да не важи във вашия случай.
 - b) Производителят не може да бъде държан под отговорност за инцидентни или последващи увреждания, произтичащи от употребата на Професионалния манекена Престън Профешънъл или нарушаване на тази или друга изразена или подразбираща се гаранция. Някои държави не допускат изключването или ограничаването на инцидентни или последващи увреждания, така че горното ограничение може и да не важи във вашия случай. Всички увреждания по смисъла на тази ограничена гаранция се ограничават до сумата на покупната цена.
6. ГАРАНЦИОНЕН СЕРВИЗ. За да получите гаранционно обслужване или информация за производството, свържете се с официалния представител за България – FirstAidBg.com на тел. 0888 246 151, 0897 802 302 или с производителя на 701 Beta Drive, Suite 2, Mayfield Village, Ohio 44143, или се обадете на 1-800-434-7989.
7. УСЛОВИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА. Тази гаранция ви дава определени законови права и вие може да имате други такива, които варират в зависимост от държавата.